


ClearView GO

Manuel d'utilisation



Configuration

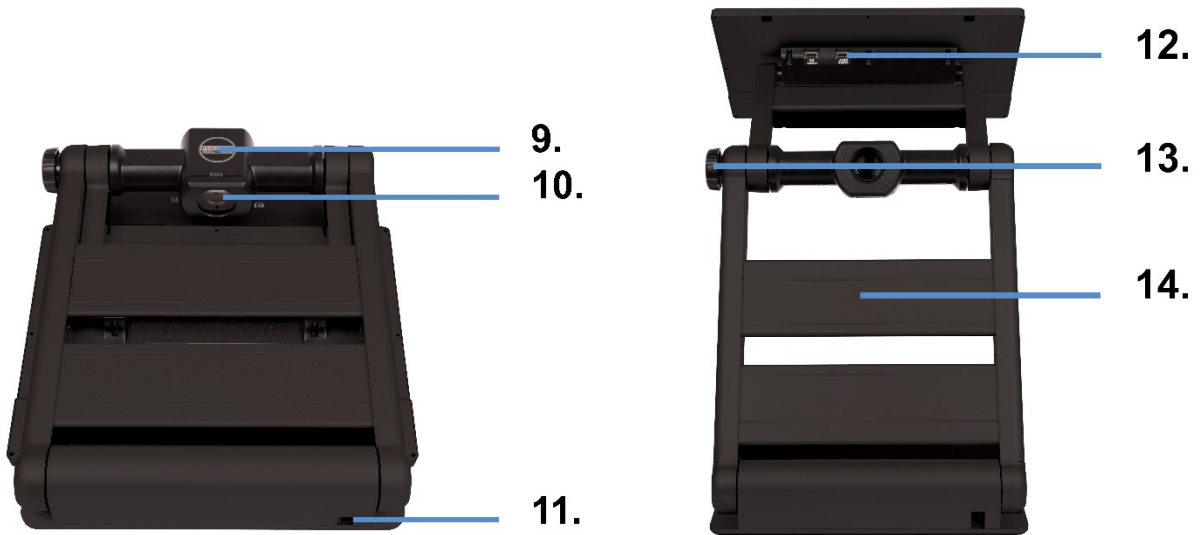

1. Bouton d'alimentation Marche/Arrêt
2. Roulette d'optimisation de l'image (Ajustement de la luminosité et le contraste)
3. Bouton Capture instantanée
4. Roulette du Zoom
5. Bouton Mode Couleurs
6. Bouton Couleur Naturelle
7. Touche Super Fonction
8. Écran LCD
9. Caméra
10. Objectif gros-plan (ouvrez cet objectif pour une vue à distance)
11. Prise DC (insérez l'adaptateur secteur ici pour charger la batterie)
12. Sortie HDMI
13. Roulette de positionnement de la caméra
14. Lumières DEL

Remarque: avec la caméra ⑨, évitez que des corps étrangers se logent sur l'objectif. Si cela se produit, utilisez le linge de microfibre fourni pour essuyer la lentille.

1. Introduction

Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre nouveau ClearView GO. ClearView GO offre le même confort de lecture, la même facilité d'utilisation et les mêmes fonctionnalités qu'un télé-agrandisseur de bureau dans un design pliable et compact. Il est donc la solution idéale pour ceux qui nécessitent du télé-agrandissement à des endroits variés. ClearView GO vous permet de lire et de visualiser des objets à la maison, au bureau, dans la salle de classe ou ailleurs. Son design pliable le rend extrêmement facile à transporter ou à entreposer lorsque vous n'en avez pas besoin.

1.1. À propos de ce manuel

Ce manuel vous aidera à vous familiariser avec l'utilisation et les fonctions du ClearView GO. Lisez-le attentivement avant la première utilisation. Si vous avez des questions ou des suggestions concernant l'utilisation de ce produit, veuillez contacter votre distributeur Optelec ou le siège social d'Optelec à l'aide de l'information de contact fournie à la fin de ce manuel. Vos commentaires sont appréciés. Nous espérons que vous apprécierez travailler avec votre ClearView GO.

1.2. Instructions avant de débiter

La batterie doit être pleinement chargée avant la première utilisation. Veuillez connecter l'adaptateur d'alimentation fourni à l'entrée DC pour charger la batterie. Pendant la charge, un voyant rouge est allumé. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant est vert.

Enlevez le film de protection de l'écran LCD avant d'utiliser l'appareil. Évitez qu'un corps étranger n'adhère à la lentille de la caméra. Essuyez les corps étrangers de la lentille avec le linge fourni.

1.3. Contenu de la boîte

L'emballage du ClearView GO contient les éléments suivants. Si un ou des éléments sont manquants, veuillez contacter votre distributeur.

1. Agrandisseur portatif
2. Adaptateur d'alimentation
3. Pochette de transport (modèle 15 pouces uniquement)
4. Manuel d'utilisation
5. Linge en microfibre pour nettoyer l'écran

2. Pour débuter

2.1. Ouvrir le ClearView GO

1.



2.



3.



4.



5.



6.



1. Placez le ClearView GO fermé sur une surface plane et stable.
2. Maintenez la base de l'appareil d'une main tout en soulevant la partie supérieure de l'appareil de l'autre main.
3. Soulevez le bras jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la bonne position.
4. Tenez des deux mains les côtés gauche et droit du moniteur LCD.
5. Tirez le moniteur LCD vers vous.
6. Poussez le moniteur vers le haut avec les deux mains et ajustez-le à la position souhaitée.

2.2. Fermer le ClearView GO



1. Tenez des deux mains les côtés gauche et droit du moniteur LCD.
2. Pour fermer ClearView GO, abaissez l'écran LCD à deux mains.
3. Poussez le moniteur vers la partie centrale de l'appareil.
4. Placez les deux mains sur le dessus de la partie supérieure de l'appareil.
5. Descendez le dessus de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit fermé.

2.3. Positions de caméra



Vous pouvez basculer entre les modes en pivoter/ ajuster avec la Roulette de positionnement de la caméra.

1. Mode Lecture
2. Mode Distance (ouvrez l'objectif en plan éloigné pour une visualisation à distance)
3. Mode Auto-visualisation (mode miroir)

3. Boutons



1. Bouton Marche/Arrêt

Pour allumer / éteindre l'appareil, appuyez sur ce bouton pendant deux secondes.

2. Roulette d'optimisation de l'image

Fonctions différentes selon le réglage.

- En mode couleur naturelle, tournez le bouton pour régler la luminosité de l'affichage (cinq niveaux).
- En mode couleur à contraste élevé, tournez le bouton pour régler le contraste de l'image. Appuyez dessus pour revenir au réglage par défaut.
- Pour activer / désactiver la mise au point automatique, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

3. Bouton Capture instantanée

Appuyez brièvement sur le bouton Capture instantanée (3) pour figer l'image.

- Vous pouvez alors faire un zoom avant ou arrière sur l'image gelée et ajuster la couleur ou la luminosité.
- Lorsque l'image est agrandie, vous pouvez faire un panoramique autour de l'image à l'aide de la touche Super Fonction (7).

Appuyez sur le bouton à nouveau pour retourner au mode en direct.

4. Roulette du Zoom

Tournez la roulette pour ajuster le grossissement. Le niveau d'agrandissement dépend de la taille de ClearView GO que vous possédez.

- ClearView GO 15":
Grossissement: 1,4x à 20x, 2,0x à 32x (par défaut) ou 3,5x à 60x.
Agrandissement supplémentaire dans l'image capturée: 5,5x.

- ClearView GO 17":
Grossissement: 1,4x à 25x, 2,3x à 35x (par défaut) ou 3,5x à 70x.
Agrandissement supplémentaire dans l'image capturée: 5,5x.

Différents niveaux d'agrandissement peuvent être définis dans le menu. Appuyez sur la roulette du zoom et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu et sélectionnez le niveau du zoom pour le régler. Pour plus d'informations sur la façon de procéder, reportez-vous à la section «Rapport de zoom» du [chapitre 5.2](#).

5. Bouton Mode Couleur


L'image affichée peut être visualisée en huit modes de couleurs, le mode couleur naturelle et sept couleurs à contraste élevé:

- Mode Couleur naturelle
- Texte blanc sur fond noir
- Texte noir sur fond blanc
- Texte jaune sur fond noir
- Texte noir sur fond jaune
- Texte vert sur fond noir
- Texte bleu sur fond jaune
- Texte jaune sur fond bleu

Jusqu'à 35 modes couleurs peuvent être programmés dans le menu.

6. Bouton Couleur naturelle

Appuyez sur le bouton pour voir les images ou documents dans leurs couleurs réelles.

Maintenez enfoncé le bouton Couleur naturelle  pour utiliser la fonction Rechercher une fois agrandi. La fonction Rechercher vous permet de faire un zoom arrière rapide et de voir l'image entière. Relâcher le bouton ramène la caméra au niveau d'agrandissement d'origine.

7. Touche Super Fonction

Utilisé pour le panoramique / défilement de l'image figée lorsqu'elle est agrandie. Reportez-vous au [chapitre 4.4](#).

Utilisé pour sélectionner et appliquer la fonction ligne / masque. Se référer au [chapitre 4.1](#).


4. Principales Touches et Fonctions

4.1. Ligne et Masque


Maintenez la touche Super Fonction (7) pour activer ou désactiver Ligne & Masque.

Lorsque Ligne & Masque est activé, la touche de direction et la roulette de la touche Super Fonction (7) fonctionnent de la manière suivante.

- Gauche & Droite ◀ ▶ : Choisir la fonction.

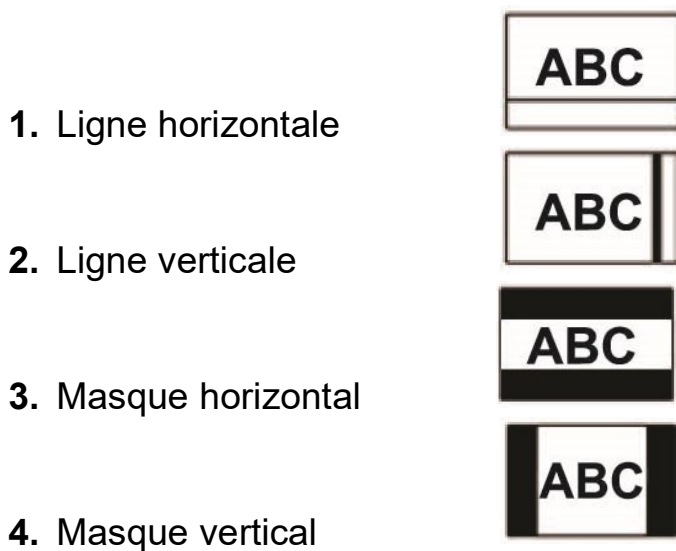


- Haut & Bas ▲ ▼ : Augmenter ou réduire l'épaisseur d'une ligne ou la distance entre les masques.

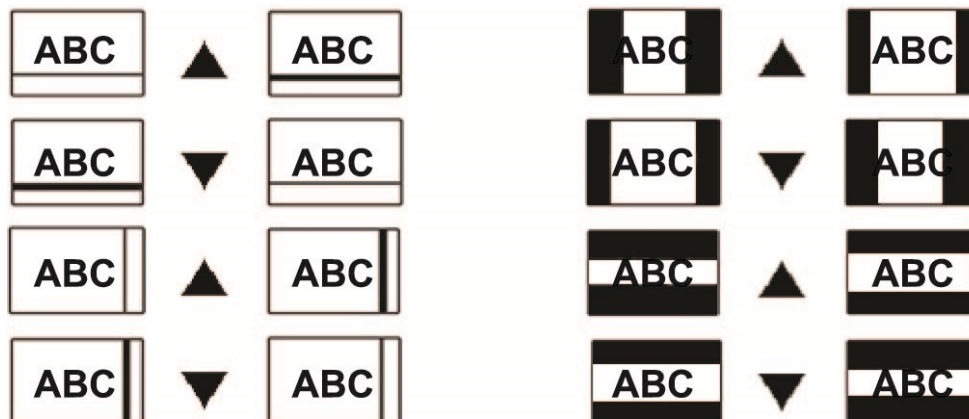


- Tourner la roulette déplace la position de la ligne ou du masque.

1) Sens antihoraire

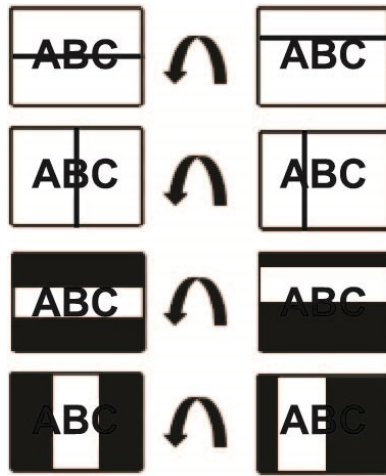

2) Sens horaire

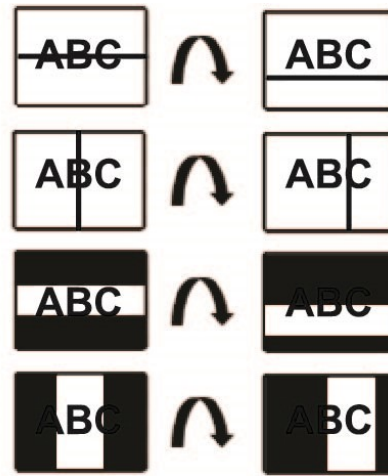

4.2. État de la batterie

L'état de la charge restante à la batterie n'est pas normalement affiché. L'icône de chargement de la batterie s'affiche lorsque l'adaptateur d'alimentation est connecté.

Pour vérifier l'état de la batterie restante, appuyez sur le bouton de capture d'image ③ pendant trois secondes ou plus.

4.3. Mode Sortie HDMI

Lors du raccordement du câble de sortie HDMI, l'écran LCD est vide et les informations sont affichées sur un moniteur externe.

Vous pouvez basculer entre l'écran LCD et un moniteur externe en appuyant sur la touche Super Fonction ⑦.

4.4. Faites défiler l'image figée

Ajustez le niveau de zoom comme vous le souhaitez pour cadrer toute la zone que vous souhaitez lire. Appuyez ensuite sur le bouton Capture d'image ③ pour figer l'image.

Lorsque vous appuyez sur la roulette du zoom ④ dans l'image figée, un marqueur de ligne horizontale apparaît. Vous pouvez déplacer cette ligne en tournant la touche Super Fonction ⑦.

Vous pouvez faire un zoom avant ou arrière sur l'image gelée avec la roulette du zoom ④. Lorsque l'image est agrandie, vous pouvez faire un panoramique autour de l'image figée à l'aide des touches de direction haut / bas et gauche / droite autour de la touche Super Fonction ⑦. Lorsque vous effectuez un panoramique jusqu'à la fin d'une image figée, vous pouvez passer au paragraphe ou à la ligne suivante en relâchant la touche de direction gauche ou droite et en appuyant à nouveau dessus.

À tout moment pendant le panoramique de l'image, votre position de lecture actuelle est affichée en appuyant sur le bouton Couleur naturelle et en le maintenant enfoncé. L'emplacement de la zone agrandie est affiché dans tout le champ de visionnement.

4.5. Mode Économie de batterie

Si vous laissez l'appareil allumé et inutilisé pendant 10 minutes, l'écran LCD s'éteint pour économiser la batterie. Si l'appareil est laissé pendant trois minutes supplémentaires, l'alimentation est automatiquement coupée. Pour plus d'informations sur la façon de régler le temps, reportez-vous à la section «Mode d'économie d'énergie» du [chapitre 5.3](#).

4.6. Sélection du Mode Couleurs

Maintenez appuyé le Bouton Mode couleurs ⑤ et tournez la Roulette du Zoom ④ pour vous décaler parmi les choix de Modes Couleurs disponibles. Pour plus d'informations sur la sélection des couleurs, reportez-vous à la section «Mode couleur» du [chapitre 5.2](#).

- Bouton Mode Couleurs ⑤ + Roulette du Zoom ④, Droite: Mode couleur suivant
- Bouton Mode Couleurs ⑤ + Roulette du Zoom ④, Gauche: Mode Couleurs précédent

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode couleur pour parcourir les modes couleur disponibles.

4.7. Modes Auto-visualisation et Distance

Vous pouvez changer le mode de visualisation en déplaçant la caméra avec la roulette de positionnement de la caméra ⑬.

Mode Auto-visualisation (Mode miroir)

Utilisez cette option lorsque la direction de la caméra est dirigée vers vous.

- La caméra se mettra automatiquement en Mode Auto-visualisation.
- La plage de grossissement sera diminuée.
- La caméra se mettra automatiquement en Mode Couleur naturelle.

Mode Distance

Utilisez ce mode pour afficher un objet distant, tel qu'un tableau blanc. Ouvrez l'objectif de plan éloigné lorsque vous utilisez ce mode.

- La caméra passera automatiquement en Mode Distance.
- La plage de grossissement sera diminuée.
- La caméra passera automatiquement au Mode Couleur naturelle.

5. Menu

Vous pouvez utiliser le menu pour personnaliser le produit. Cette section décrit comment naviguer dans les menus et sélectionner les options pour changer l'apparence de votre ClearView GO.

5.1. Navigation dans le menu

Appuyez et maintenez enfoncer le centre de la roulette du zoom (4) pour entrer et quitter le menu. Une fois dans le menu, vous pouvez modifier ou enregistrer les paramètres à l'aide de la roulette du zoom (4) ou de la touche Super Fonction (7).

- Déplacez-vous dans le menu en tournant la roulette du zoom (4) ou la touche Super Fonction (7).
- Sélectionnez une option en appuyant au centre de la roulette du zoom (4) ou de la touche Super Fonction (7).
- Pour revenir à l'écran précédent, maintenez le centre de la roulette du Zoom (4) ou de la touche de Super Fonction (7) enfoncée.

5.2. Options de menu

Les options de menu suivantes sont disponibles: **Mode couleur**, **Rapport de zoom**, **Luminosité LED**, **Plus de paramètres** et **Réinitialiser**.

Dans le menu **Plus de paramètres**, les options suivantes sont disponibles: **Langue**, **Vitesse de défilement des captures d'images**, **Mode de verrouillage des touches**, **Personnel et public** et **Mode d'économie d'énergie**.

Mode couleur

En utilisant l'option Mode couleur, vous pouvez ajouter ou supprimer vos combinaisons de couleurs à contraste élevé préférées. La valeur par défaut est une sélection de sept modes de couleur à contraste élevé.

- Par défaut: sept modes de couleur à contraste élevé sélectionnés
- Additionnel: les 35 modes de couleur sélectionnés

Sélectionnez vos modes de couleur préférés à l'aide de la roulette du zoom (4) ou de la touche Super Fonction (7). Activez et désactivez un mode couleur en appuyant sur la roulette du zoom (4). Un mode couleur est activé lorsqu'il est entouré de rouge. Un mode couleur est désactivé lorsqu'il est entouré de gris.

Appuyez sur **enregistrer** pour appliquer les modifications que vous avez apportées.

Rapport de zoom

Pour ClearView GO 15", la plage d'agrandissement par défaut est de 2,0x à 32x. Vous pouvez définir la plage d'agrandissement sur:

- 1,4x à 20x
- 2,0x à 32x
- 3,5x à 60x

Pour ClearView GO 17", la plage d'agrandissement par défaut est de 2,3x à 35x. Vous pouvez définir la plage d'agrandissement sur:

- 1,4x à 25x
- 2,3x à 35x
- 3,5x à 70x

Luminosité LED

Avec cette option, vous pouvez régler la luminosité des LED sur 11 niveaux différents, notamment en éteignant complètement les lumières.

Réinitialiser

Ce menu réinitialise tous les paramètres aux valeurs par défaut.

5.3. Plus de paramètres

Si vous sélectionnez **Plus de paramètres**, vous pouvez régler les fonctions suivantes : **Langue**, **Vitesse de défilement des captures d'images**, **Mode de verrouillage des touches**, **Personnel et public** et **Mode d'économie d'énergie**.

Pour enregistrer vos paramètres mis à jour, sélectionnez **Enregistrer et quitter** ou maintenez enfoncée la molette Image Optimizer (2).

Langue

Ce menu vous permet de sélectionner votre langue préférée.

Vitesse de défilement des captures d'images

Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez régler la vitesse de défilement / panoramique de capture. Ou utilisez la molette Image Optimizer (2). Vous pouvez tester la vitesse de défilement en temps réel à l'aide de la touche Super Fonction (7). Assurez-vous d'avoir zoomé pour pouvoir tester la vitesse de défilement.

Mode de verrouillage des touches

Si vous sélectionnez **Oui**, seules 3 touches sont disponibles : la roulette du Zoom (4), la touche de mode couleur (5) et la touche de couleur naturelle (6). Si vous sélectionnez **Non**, tous les boutons sont disponibles.

Personnel et public

Avec le mode **Personnel**, tous les paramètres utilisateur personnalisés actuels sont mémorisés après le redémarrage de l'appareil.

Avec le mode **Public**, tous les paramètres reviennent à leurs valeurs d'usine par défaut après le redémarrage de l'appareil. Le mode public est recommandé lorsqu'un périphérique est utilisé par plusieurs personnes, comme dans une bibliothèque.

Mode économie d'énergie

Pour économiser la batterie, vous pouvez régler la durée avant que l'écran LCD s'éteigne automatiquement après une période de non-utilisation. Vous pouvez également régler l'heure à laquelle l'alimentation est coupée. Les paramètres par défaut sont:

- Le temps d'extinction automatique de l'écran LCD est de 10 minutes.
- Le temps de mise hors tension automatique est de trois minutes.

Spécifications techniques

ClearView GO 15''

Écran LCD -Dimensions	15.6 pouces (396mm), 16 : 9 écran large
Résolution	1920 x 1080 (Plein HD)
Angle de rotation	180 degrés
Spécifications de la caméra	1920 x 1080, 60 images/seconde Mise au point automatique
Dimensions	Ferme: 384 x 405 x 64 mm 15.1 x 16 x 2.5 po Ouvert: 384 x 400 x 577 (max) mm 15.1 x 15.75 x 22.7 (max) po
Poids	4.8 kg / 10.65 lb.
Modes de couleurs	Par défaut 8, comprenant la couleur naturelle (Mode additionnel 35)
Plage de grossissement	Sélectionnable : 1,4x à 20x, 2,0x à 32x (défaut), ou 3,5x à 60x. Agrandissement supplémentaire dans l'image capturée: 5,5x
Modes de caméra	Mode Lecture, Mode Distance, Mode Auto-visualisation
Batterie – Capacité	16.8V, 5200mAh
Poids de la batterie	400 g / 0.90 lb.
Durée de la batterie	5 heures
Consommation	14~20W (en opération)
Puissance d'entrée – Adaptateur	100-240V, 50-60Hz, 1.7A
Puissance de sortie – Unité	DC +19V-3.42A
Connectivité	Sortie HDMI

ClearView GO 17”

Écran LCD -Dimensions	17.3 pouces (439mm), 16 : 9 écran large
Résolution	1920 x 1080 (Plein HD)
Angle de rotation	180 degrés
Spécifications de la caméra	1920 x 1080, 60 images/seconde Mise au point automatique
Dimensions	Ferme: 411 x 432 x 64 mm 16.2 x 17 x 2.5 po Ouvert: 411 x 445 x 653 (max) mm 16.2 x 17.5 x 25.7 (max) po
Poids	5.465 kg / 12.05 lb.
Modes de couleurs	Par défaut 8, comprenant la couleur naturelle (Mode additionnel 35)
Plage de grossissement	Sélectionnable : 1,4x à 25x, 2,3x à 35x (défaut), ou 3,5x à 70x. Agrandissement supplémentaire dans l'image capturée: 5,5x
Modes de caméra	Mode Lecture, Mode Distance, Mode Auto-visualisation
Batterie – Capacité	16.8V, 5200mAh
Poids de la batterie	400 g / 0.90 lb.
Durée de la batterie	5 heures
Consommation	14~20W (en opération)
Puissance d'entrée – Adaptateur	100-240V, 50-60Hz, 1.7A
Puissance de sortie – Unité	DC +19V-3.42A
Connectivité	Sortie HDMI

Avis de sécurité et de réglementation

- Une utilisation négligente du produit peut causer un incendie, des blessures ou de sérieux dommages.
- Afin d'éviter un incendie ou un choc électrique, ne pas utiliser une prise ou fiche électrique endommagée ou inappropriée.
- Afin d'éviter un choc électrique, ne pas toucher la prise ou fiche électrique avec une main mouillée.
- Une mauvaise utilisation du produit peut causer des blessures corporelles ou endommager l'appareil.
- Utiliser uniquement l'adaptateur fourni avec ce produit. L'utilisation d'un autre adaptateur peut endommager l'appareil.
- Ne pas utiliser cet appareil dans un environnement humide, par exemple dans une salle de bain.
- Ne pas placer d'objet lourd sur l'appareil.
- Ne pas tenter de désassembler, modifier ou réparer l'unité. Cela peut endommager l'appareil et annulera la garantie.
- Il est possible que la durée de vie de la batterie diminue après six (6) mois d'utilisation.
- Garder l'appareil hors de la lumière solaire directe et des températures extrêmes.
- L'affichage peut ne pas s'afficher correctement.
- Il est recommandé d'opérer l'appareil dans une température se situant entre 0 ~ 35 °C (32 ~ 95 °F).

Précautions d'emploi

- Suivez tous les avertissements, mises en garde et instructions indiqués sur le produit.
- Utilisez ClearView GO sur une surface stable et de niveau telle qu'un bureau ou une table solide, conformément aux spécifications de conception prévues.
- Évitez de placer ClearView GO sur une table, un chariot ou un support instable. Il pourrait tomber, causant de graves dommages à l'appareil ou des blessures corporelles.
- Utilisez ClearView GO uniquement à l'intérieur - il ne doit PAS être exposé à des changements extrêmes ou rapides de température ou d'humidité. Ne placez pas ClearView GO près d'un radiateur ou de zones exposées à de longues heures de soleil direct. Ces conditions peuvent endommager l'électronique ou l'optique de l'appareil.
- Au moins une fois par semaine, nettoyez ClearView GO avec un chiffon doux et sec ou un chiffon à poussière électrostatique. NE PAS utiliser de nettoyants

liquides sur ses surfaces en plastique. Aucune méthode supplémentaire de stérilisation ou de nettoyage n'est recommandée ou requise.

- N'utilisez pas ClearView GO à proximité de matériaux ou de liquides inflammables.

Sécurité et entretien

Pour garantir votre sécurité et tirer le meilleur parti de ClearView GO, lisez attentivement ces précautions de sécurité.

ClearView GO agrandit et améliore le texte et les objets afin d'améliorer la qualité de vie des personnes malvoyantes. La mesure dans laquelle ce produit peut améliorer la capacité de voir des images dépend de l'état individuel d'une personne et de son niveau de déficience visuelle.

ClearView GO n'est pas conçu pour restaurer la vision, corriger les problèmes oculaires ou arrêter la perte de vision dégénérative. Un professionnel des soins oculaires peut déterminer l'utilité et la pertinence de ClearView GO pour l'état individuel d'un patient.

Prendre soin de ClearView GO

Pour prendre soin de votre ClearView GO, suivez ces recommandations:

- Lorsque ClearView GO n'est pas utilisé et n'est pas connecté à une alimentation externe, coupez toujours l'alimentation en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes.
- Assurez-vous que votre ClearView GO est complètement éteint avant de le nettoyer.
- Nettoyez ClearView GO avec un chiffon doux et sec ou un chiffon à épousseter électrostatique. NE PAS utiliser de nettoyeurs liquides sur ses surfaces en plastique.
- Pour prolonger la durée de vie de ClearView GO, retirez la batterie de l'appareil s'il ne sera pas utilisé pendant une semaine ou plus.
- La vitre de protection recouvrant la caméra peut être nettoyée au besoin avec le chiffon d'objectif fourni dans l'emballage de ClearView GO. NE PAS utiliser de nettoyeurs liquides sur les surfaces en plastique. Aucune méthode supplémentaire de stérilisation ou de nettoyage n'est recommandée ou requise.

Transport de ClearView GO

Transportez l'appareil en saisissant fermement le corps principal du ClearView GO lorsqu'il est en position repliée.

Avertissement: ne transportez pas ClearView GO par la tête de la caméra car cela pourrait endommager votre appareil.

Le ClearView GO 15 "est livré avec un étui de transport pratique pour le transport. Pour éviter que l'appareil ne tombe accidentellement et ne soit endommagé, remettez toujours le ClearView GO dans son étui de transport lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez et fixez tous les câbles avant de déplacer l'appareil.

Précautions de sécurité mécaniques supplémentaires

Votre ClearView GO comporte des pièces mobiles. N'essayez pas de repositionner ou d'ajuster de force les pièces. Cela pourrait endommager l'appareil.

Remarque: Soyez prudent lorsque vous déplacez des pièces ou lorsque vous transportez le ClearView GO pour éviter de vous blesser aux mains et aux doigts.

Sensibilité aux interférences

Il peut y avoir une dégradation temporaire de l'image lorsque ClearView GO est soumis à un fort champ de radiofréquences, une décharge électrostatique ou un bruit électrique transitoire. Une décharge électrostatique (causée par de l'électricité statique) peut provoquer un écran vide. Si cela se produit, procédez comme suit:

- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique murale.
- Attendez 30 secondes.
- Rebranchez l'alimentation de l'adaptateur CC.

Précautions de sécurité électrique supplémentaires

Lisez ces précautions de sécurité avant d'utiliser ClearView GO:

- L'utilisation d'une alimentation autre que celle fournie par Optelec pour ClearView GO annulera la garantie.
- Si vous utilisez une alimentation CC, le périphérique ClearView GO doit être à proximité d'une prise murale facilement accessible.
- N'utilisez pas ClearView GO dans, près ou autour de l'eau. ClearView GO n'est pas conçu pour offrir une protection contre le contact avec des liquides de toute nature.
- Utilisez uniquement l'alimentation fournie avec votre ClearView GO. L'utilisation de blocs d'alimentation non autorisés peut endommager gravement les composants électroniques de ClearView GO.
- Eloignez toujours le cordon d'alimentation des zones de circulation pour éviter d'endommager le bloc d'alimentation.

- Évitez tout risque de choc électrique en n'essayant PAS de démonter l'appareil. Confiez tous les services à un centre de réparation agréé.
- Assurez-vous que vous effectuez toutes les connexions de câbles appropriées.

Avis de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans certains cas. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise murale sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non autorisés à ce système peuvent annuler votre droit d'utiliser cet équipement.

Industry Canada (IC) Notice

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil est enregistré CEM.



Cet appareil porte les sceaux d'approbation du CE et de la FCC, marque d'approbation KC.