


# Installatiehandleiding GoBox/ VoBox

1.

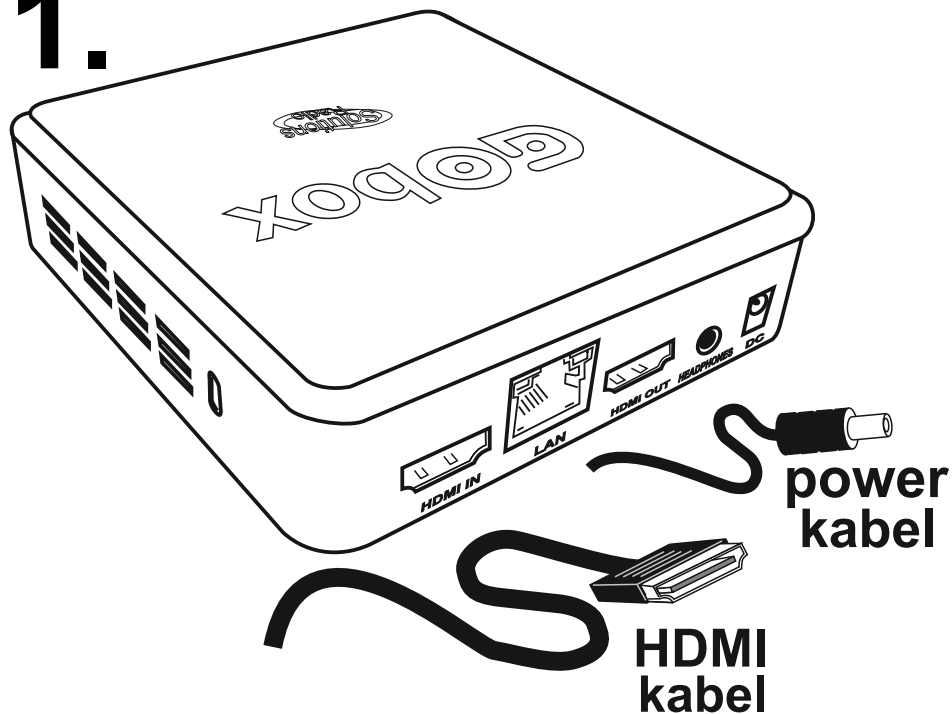

Haal de HDMI kabel en de adapter uit de doos. De GoBox / VoBox wordt tussen de digitale ontvanger en de televisie aangesloten.

2.




Haal de HDMI kabel die van uw digitale ontvanger (bijvoorbeeld Ziggo of KPN) naar de televisie loopt, uit de televisie. Plaats deze in de 'HDMI IN' poort van de Go/Vobox.

3.



Plaats de meegeleverde HDMI kabel in de 'HDMI OUT' poort van de Go/Vobox en de andere kant in de eerder gebruikte HDMI poort van uw televisie.

4.

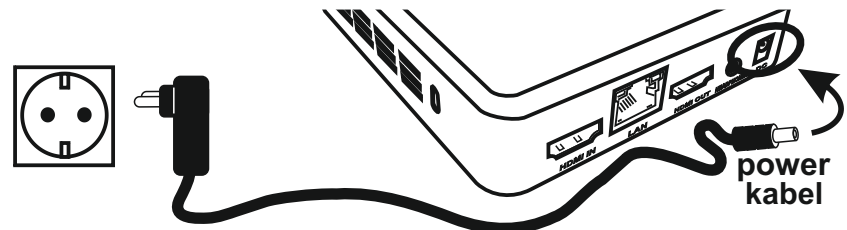

Sluit nu de Go/Vobox adapter aan op het lichtnet en start de televisie. Doe de batterijen in de afstandsbediening en lees voor de instellingen van de Go/Vobox de meegeleverde handleiding.

Optelec Nederland BV - Pesetastraat 5a - 2991 XT - Barendrecht

**088-6783555**