


## Ondertitel stijl aanpassen

Bij Netflix kunt u zelf de text stijl bepalen van de getoonde ondertitels, die vervolgens door de meeste spelers worden overgenomen (zoals Ziggo decoders, Chromecast e.d.). Apple-TV bepaalt echter zelf welk lettertype er gebruikt wordt (zie het document 'AppleTV instellen'). Het onderstaande scherm toont hoe die stijl bij Netflix-instellingen zo ingesteld kan worden, dat de Go-box dat goed kan voorlezen.

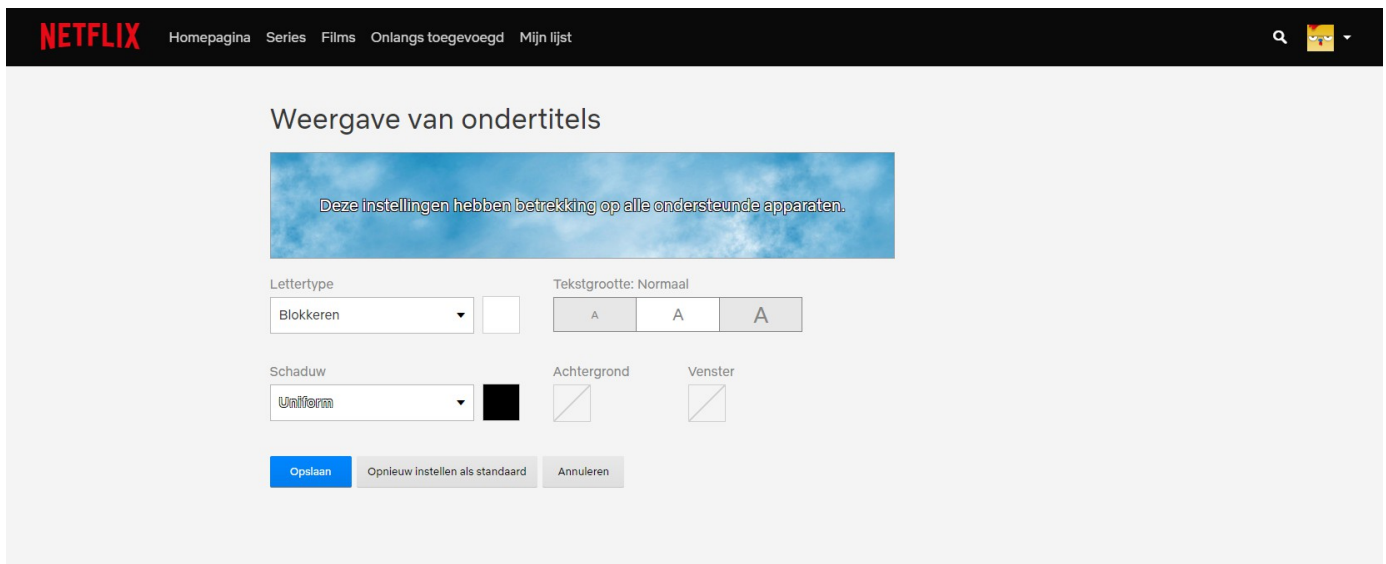

The screenshot shows the Netflix subtitle settings page. At the top, there is a navigation bar with the Netflix logo and links for Homepagina, Series, Films, Onlangs toegevoegd, and Mijn lijst. The main heading is 'Weergave van ondertitels'. Below this, a blue banner states 'Deze instellingen hebben betrekking op alle ondersteunde apparaten.' The settings are organized into several sections: 'Lettertype' with a dropdown menu set to 'Blokkeren'; 'Tekstgrootte: Normaal' with three buttons labeled 'A', 'A', and 'A'; 'Schaduw' with a dropdown menu set to 'Uniform' and a black color swatch; 'Achtergrond' with a white color swatch; and 'Venster' with a white color swatch. At the bottom, there are three buttons: 'Opslaan' (highlighted in blue), 'Opnieuw instellen als standaard', and 'Annuleren'.


Lettertype: Blokkeren

Tekstgrootte: Normaal

Schaduw: Uniform zwart

## Beeldkwaliteit instellen

Bij Netflix kunt u het best ook instellen dat altijd de hoogste beeldkwaliteit wordt gekozen (zie onder).

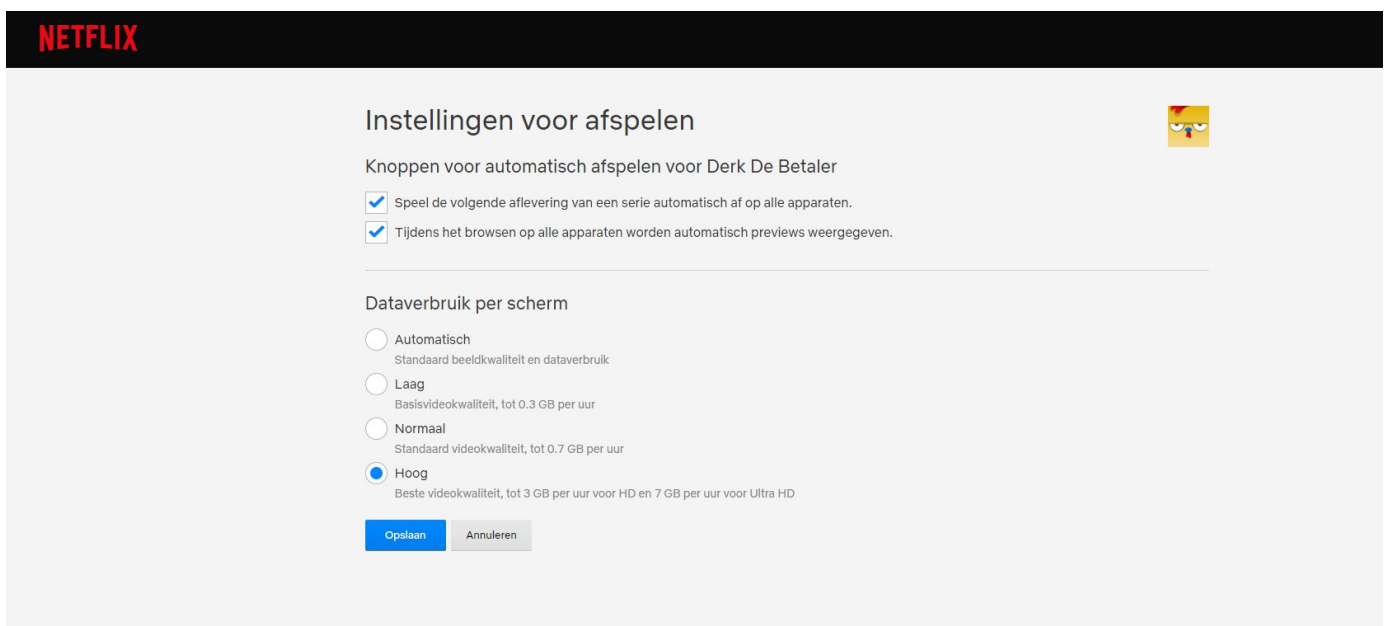

The screenshot shows the Netflix playback settings page. At the top, there is a navigation bar with the Netflix logo. The main heading is 'Instellingen voor afspelen'. Below this, there is a section for 'Knoppen voor automatisch afspelen voor Derk De Betaler' with two checked checkboxes: 'Speel de volgende aflevering van een serie automatisch af op alle apparaten.' and 'Tijdens het browsen op alle apparaten worden automatisch previews weergegeven.' Below this, there is a section for 'Dataverbruik per scherm' with four radio button options: 'Automatisch' (Standard beeldkwaliteit en dataverbruik), 'Laag' (Basisvideokwaliteit, tot 0.3 GB per uur), 'Normaal' (Standaard videokwaliteit, tot 0.7 GB per uur), and 'Hoog' (Beste videokwaliteit, tot 3 GB per uur voor HD en 7 GB per uur voor Ultra HD). The 'Hoog' option is selected. At the bottom, there are two buttons: 'Opslaan' (highlighted in blue) and 'Annuleren'.

Dataverbruik per scherm: Hoog