

Orion Webbox

Snelstart handleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw webbox.

Deze handleiding zal uw nieuwe toestel laten verbinding maken met het internet, zodat u meteen aan de slag kunt.

Benodigdheden:

- Internetaansluiting met draadloze routerfunctie
- een vrij stopcontact
- een Webbox

Stap 1:

Plaats de webbox in dezelfde ruimte, of naast uw draadloze router, en stop deze in het stopcontact.

Stap 2:

Druk op de aan/uit toets van de webbox, en wacht totdat deze een gesproken melding geeft.

Stap 3:

Druk de volumetoets in, zodat u in het pauze menu komt.

Navigeer met behulp van de pijltoetsen naar het menu item "Apparaat Configuratie". Druk op de OK toets.

Ga opnieuw met de pijltoetsen naar "Draadloos netwerk toevoegen".

Indien uw router een WPS knop (zie afbeelding) heeft, druk deze dan nu in gedurende 2 seconden. Ga naar Stap 4.

Indien uw draadloze router GEEN WPS knop heeft, druk dan op OK.

Ga nu naar dan naar Stap 5.



Stap 4:

Selecteer uw netwerk uit de lijst met de pijltoetsen, en druk op OK.

Voer de geheime netwerkcode in, door te draaien aan de volumetoets, en elk karakter te bevestigen door de OK toets.

Indien de code volledig is, draait u de volumetoets door naar rechts, totdat u "Klaar" hoort, druk nu op OK.

Stap 5: (Enkel indien u WPS heeft)

Druk op de OK toets, uw webbox zal u nu vragen of u verbinding wilt maken met uw netwerk, bevestig dit door middel van de OK toets.

Stap 6:

Klaar, herstart het toestel met de aan/uit toets, en het toestel zal nu verbinding maken met uw draadloze netwerk.

Het toestel is nu klaar voor gebruik in elke ruimte waar u uw draadloze netwerk kunt ontvangen.